

### نکات کاربردی:

- اندیکاتورهای نواری یکبار مصرف BD را در ابتدا از وسط تا کرده و در داخل در پوش قرار داده و سپس آن را مجدد در داخل دستگاه فلزی ببندید و سپس جهت صحت در کاربری و همچنین عملکرد صحیح تر دستگاه ها آن را در کیف های مخصوص پارچه ای قرار دهید و به صورت کامل در مرکز دستگاه یا نزدیک درب های دستگاه جایگذاری کنید .
- توصیه می شود این تست را در سیکل ابتدایی هر روز با چمبر خالی دستگاه استریلایزر انجام شود .
- لازم به ذکر است که دستگاه های تست های BD بسته به نوع دستگاه و عملکرد آنها از 150 تا 200 سیکل مورد استفاده ستند و پس از آن باید جهت تعویض دستگاه ها اقدام کرد . (در صورت عدم پاس شدن تست از دستگاه استریلایزر استفاده نشود)

### مزیت محصول:

- دارای 8 اندیکاتور به جای 6 تا جهت اندازه گیری و دقت بالاتر در عملکرد،
- کیفیت مناسب پشت چسبدار جهت مستند سازی
- تغییر رنگ ابتدایی به قهوه ای و سپس تیره تر جهت تشخیص عملکرد دستگاه های اتوکلاو

### تغییر رنگ:

از آبی روشن به قهوه ای تیره و یا مشکی بسته به عملکرد دستگاه استریلایزر



PASS



UNPROCESSED

### معرفی محصول:

این نوع اندیکاتور ها جهت بررسی میزان نفوذ پذیری و پمپ وکیوم دستگاه های استریلایزر بخار (پری وکیوم) مورد استفاده قرار می گیرند . توصیه می شود این اندیکاتور را به صورت روزانه و در سیکل ابتدایی هر روز با چمبر خالی استفاده شود .

### مشخصات محصول:

تست نواری 8 خانه بوویدیک (Bowie-Dick/BD) به همراه دستگاه لوله ای به طول 4 متر و قطر 3 میلی متر و متصل به استوانه فلزی وکیوم طراحی و ساخته شده اند .

### بسته بندی و نگه داری:

اندیکاتور ها در بسته بندی های آلومینیومی زیپ دار مقاوم در برابر نور خورشید و ضد آب به تعداد 150 عدد در هر بسته عرضه می شود. لازم است حتما این محصول را در بسته بندی داخل جعبه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری نمائید. همچنین شرایط حفظ و نگهداری دقیق تر بر روی بسته درج شده است.



AMS-BD122

[www.asomedsana.com](http://www.asomedsana.com)

