

نکات کاربردی:

- توصیه می شود از اندیکاتور های کلاس 5 اتیلن اکساید جهت داخل پک های استریل استفاده شوند.
- جهت درج اطلاعات و مستند سازی بر روی اندیکاتور می توانید از مائیک های مخصوص استفاده کنید.
- توصیه می شود جهت صحیح نشان دادن عملکرد دستگاه استریلایزر اتیلن اکساید حتما از کارتریج های گاز اتیلن اکساید استاندارد استفاده شود .

مزیت محصول:

- درج اطلاعات جهت مستند سازی در دو نوع چسبدار و بدون چسب
- بالا بودن سطح دقت عملکرد و کمترین ضریب خطا در مقایسه با بقیه اندیکاتورها

تغییر رنگ:

از صورتی به قهوه ای در صورت قرارگیری در سیکل کامل اتیلن اکساید



PASS



UNPROCESSED

معرفی محصول:

این نوع اندیکاتور ها جهت کنترل چند منظوره فرایند استریلایزر اتیلن اکساید (EO) مورد استفاده قرار می گیرند و در صورتی که غلظت گاز 600 میلی گرم در متر مکعب و رطوبت 70% در دما 55 الی 60 درجه سانتی گراد و مدت زمان یک ساعت محیا باشد اندیکاتور تغییر رنگ خواهد داد .

مشخصات محصول:

اندیکاتور های اتیلن اکساید مناسب برای دستگاه های استریلایزر صنعتی و یا بیمارستانی اتیلن اکساید (EO) که سیکل کامل استریل را با دما و رطوبت استاندارد به اتمام می رسانند مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی و نگه داری:

اندیکاتور ها در بسته بندی های آلومینیومی زیپ دار مقاوم در برابر نور خورشید و ضد آب به تعداد 250 عدد در هر بسته عرضه می شود. لازم است حتما این محصول را در بسته بندی داخل جعبه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری نمائید. همچنین شرایط حفظ و نگهداری دقیق تر بر روی بسته درج شده است.



AMS-EO 140

www.asomed sana.com

