

نکات کاربردی:

- این اندیکاتورها جهت استفاده در دستگاه های استریلایزر پلاσμα با دمای کم مورد استفاده قرار میگیرند.
- توصیه می شود جهت صحیح نشان دادن عملکرد دستگاه استریلایزر پلاσμα حتما از کارتریج های هیدروژن پروکساید استاندارد استفاده شود.
- جهت درج اطلاعات و مستند سازی بر روی اندیکاتور می توانید از ماژیک های مخصوص استفاده کنید.
- توصیه می شود از اندیکاتور های کلاس ۵ اتیلن اکساید جهت داخل پک های استریل استفاده شوند.

مزیت محصول:

- درج اطلاعات جهت مستند سازی بر روی اندیکاتور
- ثبات تغییر رنگ پس از اتمام سیکل استریل
- عرضه در دو نوع چسبدار و بدون چسب جهت مستند سازی.

تغییر رنگ:

از قرمز به زرد در صورت قرارگیری مجاورت هیدروژن پروکساید



PASS



UNPROCESSED

معرفی محصول:

این نوع اندیکاتورها جهت کنترل چند منظوره فرایند استریلایزر پلاσμα مورد استفاده قرار می گیرند و در صورت کافی بودن میزان غلظت گاز هیدروژن پروکساید (H2O2) در بازه زمانی مشخص و در صورت صحیح بودن کلی سیکل استریل دستگاه های پلاσμα تغییر رنگ خواهند داد.

مشخصات محصول:

از آنجایی که وجود سلولز در سیکل استریل پلاσμα اکیدا ممنوع است و باعث ایجاد اختلال و جذب گاز هیدروژن پروکساید می شود این اندیکاتور های از کاغذ های مخصوص سنگی که عاری از هرگونه مواد سلولزی هستند ساخته و طراحی شده است . قابلیت درج اطلاعات جهت مستندسازی بهتر از دیگر ویژگی های این نوع محصول می باشد.

بسته بندی و نگه داری:

اندیکاتور ها در بسته بندی های آلومینیومی زیپ دار مقاوم در برابر نور خورشید و ضد آب به تعداد 250 عدد در هر بسته عرضه می شود. لازم است حتما این محصول را در بسته بندی داخل جعبه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری نمائید. همچنین شرایط حفظ و نگهداری دقیق تر بر روی بسته درج شده است.



AMS-P 140

www.asomedsana.com

