

نکات کاربردی:

- اندیکاتورهای نواری یکبار مصرف pcd را در ابتدا از وسط تا کرده و در داخل درپوش قرار داده و سپس آن را مجدد در داخل دستگاه بندید. توصیه می شود جهت صحت در کاربری و همچنین عملکرد صحیح تر دستگاه ها آن را در کیف های مخصوص پارچه ای قرار دهید و به صورت کامل در مرکز دستگاه یا نزدیک درب های دستگاه جایگذاری کنید.
- لازم به ذکر است که دستگاه های تست های pcd بسته به نوع دستگاه و عملکرد آنها از 150 تا 200 سیکل مورد استفاده هستند و پس از آن باید جهت تعویض دستگاه ها اقدام کرد.

مزیت محصول:

- دارای 5 اندیکاتور به جای 4 تا جهت اندازه گیری و دقت بالاتر در عملکرد، کیفیت مناسب پشت چسبدار جهت مستند سازی و همچنین تغییر رنگ ابتدایی به قهوه ای جهت تشخیص عملکرد دستگاه ها از مزایای این محصول نسبت به محصولات مشابه خود می باشد.

تغییر رنگ:

از آبی روشن به قهوه ای تیره و یا مشکی بسته به عملکرد دستگاه استریلایزر



PASS



UNPROCESSED

معرفی محصول:

این نوع اندیکاتور ها جهت کنترل میزان فشار، وکیوم و نفوذ پذیری بخار در دستگاه های استریلایزر بخار مورد استفاده قرار می گیرند. توصیه می شود در سیکل هایی که لوله ها و ابزارهای لومن شکل استریل می شوند حتما از این نوع اندیکاتورها استفاده شود زیرا که تست های pcd جهت شبیه سازی لومن ها طراحی شده اند.

مشخصات محصول:

تست های نواری 5 خانه پشت چسبدار به همراه دستگاه لوله ای به طول 4 مترو قطر 3 میلی متر و همچنین نگهدارنده وکیوم مخصوص اندیکاتور pcd جهت شبیه سازی لوله هایی با حداکثر طول 3 متر طراحی و ساخته شده اند.

بسته بندی و نگه داری:

اندیکاتور ها در بسته بندی های آلومینیومی زیپ دار مقاوم در برابر نور خورشید و ضد آب به تعداد 150 عدد در هر بسته عرضه می شود. لازم است حتما این محصول را در بسته بندی داخل جعبه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری نمائید. همچنین شرایط حفظ و نگهداری دقیق تر بر روی بسته درج شده است.



AMS-PCD120

www.asomedsana.com